



CE  
SWISS MADE

Sicherheit · Sécurité · Sicurezza



## Gebrauchsanweisung

# PD Care® System - Hüftschutz seit 2002

### Protektoren: Einsetzen und Entfernen

Schieben Sie die Protektoren mit der flachen Seite nach innen und der breiten Seite nach oben in die seitlichen Taschen der Funktionshose.

1. Innenseite der Funktionshose nach aussen wenden
2. Mit beiden Daumen in die Abdecklasche der Protektortasche greifen und die Innenseite der Lasche nach aussen drehen
3. Protektor einsetzen, die Abdecklasche darüberstülpen, zurückdrehen - fertig

Falls Sie die Protektoren auf der Aussenseite der Hosen tragen wollen, muss der Protektor so eingesetzt werden, dass das PD Care Logo gegen aussen getragen wird. Damit ist gewährleistet, dass die Protektoren richtig positioniert sind und ihre Wirkung entfalten.

### Funktionshosen: Hygiene, Waschen, Trocknen, Bügeln

Je nach Anspruch an die persönliche Hygiene kann/soll die Hose täglich gewaschen werden. Die Waschanleitung (Waschsymbole) für die Hosen finden Sie in der linken Protektortasche.

Die Funktionshosen werden im ersten Waschgang mit max. 40 °C und im zweiten mit bis zu 60 °C gewaschen. Es ist im Schonwaschgang und mit einem Waschmittel ohne Bleichzusatz zu waschen. Mit diesem Vorgehen werden alle eiweisshaltigen Rückstände (Blut, Stuhl, Urin) ausgewaschen und vermieden, dass Verfärbungen am Stoff entstehen.

Trocknen im Tumbler immer auf der untersten Stufe (60 °C). Bügeln mit max. 110 °C, immer auf der Rückseite. Eine chemische Reinigung ist nicht möglich. Ein minimales Einlaufen nach dem ersten Waschgang ist bei den Bund- resp. Hüftmassen berücksichtigt. So gepflegt bleibt die hochwertige Qualität und die Optik **über 200 Waschgänge** erhalten.

### Protektoren: Hygiene, Reinigung und Lebensdauer

Die Protektoren sind vor dem Waschen aus den Funktionshosen zu entfernen. Sie dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen und auch nicht im Tumbler getrocknet werden.

Wir empfehlen die Protektoren jeweils nach Gebrauch mit einem feuchten Mikrofaser Tuch (nur mit Wasser) abzuwaschen und trocknen zu lassen. Die Einheitsgrösse der Protektoren passt zu allen PD Care® Hosengrössen und Modellen

Für einen optimalen Schutz empfehlen wir, die Protektoren jeweils nach zweieinhalb- bis dreijährigem Gebrauch zu ersetzen. Protektoren, die bei korrekter Handhabung innerhalb des Verbrauchsdatums (siehe unter EXP. auf der Innenseite des Protektors) Schaden nehmen, werden kostenlos ersetzt.