



**CE** Sicherheit · Sécurité · Sicurezza  
SWISS MADE



## Istruzioni per l'uso PD Care® System - Inseri per la protezione dell'anca dal 2002

### **Inserire e togliere gli inserti di protezione**

Spingere gli inserti di protezione nelle tasche laterali degli shorts/boxer funzionali, tenendo la parte piatta verso l'interno e la parte più larga verso l'alto. Evitare di afferrare con unghie taglienti gli inserti.

1. Girare la parte interna degli shorts/boxer funzionali verso l'esterno
2. Afferrare con entrambi i pollici il lembo di copertura della tasca per l'inserto e girare all'infuori la parte interna del lembo
3. Inserire il dispositivo, coprirlo con il lembo di copertura, girare nuovamente gli shorts/boxer per il verso giusto, finito.

Qualora Lei volesse indossare gli inserti sulla parte esterna degli shorts/boxer, deve inserirli in modo che il Logo PD Care sia rivolto verso l'esterno. Così facendo si garantisce che i dispositivi siano posizionati correttamente e possano dimostrarsi efficaci.

### **Shorts/boxer funzionali: lavare, asciugare, stirare**

Le istruzioni di lavaggio (simboli di lavaggio) per gli shorts/boxer si trovano anche nella tasca sinistra per l'inserto.

La biancheria funzionale si lava nel primo ciclo di lavaggio con 40°C e nel secondo fino a 60°C, usando un detersivo delicato e senza candeggina. Con questo procedimento tutti i residui proteici (sangue, feci, urina) vengono eliminati e si impedisce una decolorazione del tessuto.

Asciugare nel tumbler sempre sul grado minimo (60°C), stirare con al massimo 110°C, sempre sul lato interno. Il lavaggio chimico non è possibile. Il prodotto può restringersi leggermente dopo il primo lavaggio, ciò è normale. Seguendo questi accorgimenti l'alta qualità e l'aspetto rimangono stabili per oltre 200 lavaggi.

### **Inseri di protezione: igiene, pulizia e durata**

Gli inserti di protezione vanno tolti dagli shorts/boxer funzionali prima del lavaggio. Non devono mai essere lavati in lavatrice o asciugati nel tumbler.

Consigliamo di lavare gli inserti di protezione dopo l'uso con un panno in microfibra umido (solo acqua) e di lasciarli asciugare. La taglia unica degli inserti è adatta a tutti i tipi di modelli e taglie degli shorts/boxer PD Care®

Per una protezione ottimale consigliamo di sostituire gli inserti dopo circa 2 ½ o 3 anni. Inserti che, pur usati correttamente ed entro la data di scadenza (vedasi sotto EXP, sul lato interno del dispositivo) presentassero danni, verranno sostituiti gratuitamente.