



CE Sicherheit · Sécurité · Sicurezza
SWISS MADE



Mode d'emploi PD Care® Système - protège-hanche dès 2002

Protecteurs : Insérer et retirer

Glissez les protecteurs avec le côté plat vers l'intérieur et le côté large vers le haut dans les poches latérales du slip fonctionnel.

Évitez de saisir la ceinture avec des ongles pointus.

1. tournez le côté intérieur du pantalon fonctionnel vers l'extérieur.
2. saisissez la fermeture de la poche du protecteur avec les pouces et tournez le côté intérieur de la languette vers l'extérieur.
3. mettre le protecteur, rabattre la fermeture par-dessus, tourner en arrière - c'est tout.

Si vous souhaitez porter les protections à l'extérieur du slip, le protecteur doit être placé de manière à ce que le logo PD Care soit porté vers l'extérieur. Cela permet également de s'assurer que les protecteurs sont correctement positionnés et qu'ils peuvent avoir un rendement optimal.

Slip fonctionnelle : lavage, séchage, repassage

Les instructions de lavage (symboles de lavage) pour les pantalons se trouvent dans la poche gauche des protecteurs.

Les slips fonctionnels se lavent à 40 °C max. au premier lavage et jusqu'à 60 °C au second. Il est recommandé de lavé avec un programme délicat et un produit de lessive sans agent blanchissant. Cette procédure permet d'éliminer tous les restes de protéines (sang, selles, urine) et d'éviter que le tissu ne se décolore.

Séchage dans le sèche-linge à la température la plus basse (60 °C). Repasser à max. 110 °C, toujours à l'envers. Nettoyage chimique n'est pas possible. Un rétrécissement minimal après le premier lavage est pris en compte dans les mesures de la taille et des hanches. Ainsi, la qualité supérieure est conservée après plus de **200 lavages**.

Protecteurs : Hygiène, nettoyage et durabilité

Les protections doivent être retirées des slips fonctionnels avant de les laver. Ne pas les passer à la machine à laver ni les faire sécher au sèche-linge. Nous conseillons de nettoyer les protecteurs après chaque usage avec un chiffon humide en microfibres (uniquement avec de l'eau) et de les faire sécher. La taille unique des protecteurs convient à toutes les tailles et modèles de slip PD Care®.

Pour une bonne sécurité, nous recommandons de remplacer les protecteurs après 2 1/2 à 3 ans.

Les protections qui, dans le cadre d'une utilisation correcte, sont endommagées pendant la période d'utilisation (voir sous EXP. à l'intérieur du protecteur) sont remplacées.